

Stručný průvodce

Glunovo i3 CGM + Glunovo Share + Webportal




Aplikace Glunovo CGM



- Aplikace na vašem chytrém telefonu přijímá data o glukóze z vysílače a zobrazuje je na displeji.
- Aplikace nepoužívá internet a veškeré osobní údaje jsou uloženy pouze ve vašem chytrém telefonu.

Aplikace Glunovo Share

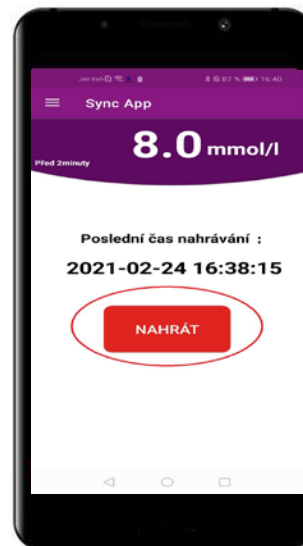

- Aplikace Glunovo Share na vašem chytrém telefonu přijímá veškerá data o glukóze z aplikace Glunovo CGM a odesílá data na cloudový server.
- Díky této aplikaci můžete po udělení vašeho souhlasu bezpečně sdílet veškeré údaje s vaším ošetřujícím lékařem.

1. Nainstalujte si aplikace Glunovo CGM a Glunovo Share

Stáhněte si aplikaci Glunovo CGM a Glunovo Share z obchodu Google Play nebo App Store.

Aplikace je vhodná pro systém Android 8.0 a vyšší a iOS 12 a vyšší.

Otestováno na telefonech:

- ✓ **Samsung:** Galaxy S8, Galaxy S8+, Galaxy S9, Galaxy S9+
- ✓ **Vivo:** NEX, X21
- ✓ **Oppo:** R17, R17 Pro
- ✓ **OnePlus:** 6
- ✓ **Huawei:** Mate 10, Mate 10 Pro, P10, P10 Pro, Honor 9 series, Honor 10 series
- ✓ **Xiaomi:** 8 series, MIX 2 series
- ✓ **iPhone:** 6 a výše



2. Jak dále postupovat?





- Zkontrolujte, zda máte v telefonu zapnutou funkci Bluetooth.
- Vypněte na svém telefonu režim Nerušit.
- Ujistěte se, že aplikace Glunovo CGM a Glunovo Share jsou otevřené a spuštěné.
- Zajistěte aplikaci Glunovo Share přístup k WiFi nebo mobilním datům.
- Ujistěte se, že aplikace Glunovo Share je vždy spuštěna.
- Po restartování chytrého telefonu restartujte i aplikaci Glunovo Share.
- Při používání aplikace Glunovo Share nikdy neaktivujte režim nízké spotřeby baterie.

3. Zaregistrujte se v aplikaci Glunovo Share

- Otevřete aplikaci Glunovo Share a klikněte na odkaz **registrovat**. (obrázek 1)
- Zadejte své **jméno a příjmení**, informace o **zemi**, **e-mail** a klepněte na **POSLAT**. (obrázek 2)

Na zadanou e-mailovou adresu vám bude během 5 minut zaslán e-mail s **ověřovacím kódem**. Zkontrolujte si prosím i SPAMovou složku, e-mail s kódem může být označen jako SPAM.

- Opište **ověřovací kód** a zadejte **heslo**, potvrďte **heslo**, zatrhněte **Pravidla a podmínky** a potvrďte **REGISTROVAT**. (obrázek 3)
- Heslo musí obsahovat velká, malá písmena, číslice, speciální znak a musí mít alespoň 8 znaků – např. **Karel64@**
- Pokud jste se již dříve registrovali, přihlaste se pomocí zaregistrovaného e-mailu a hesla. (obrázek 4)

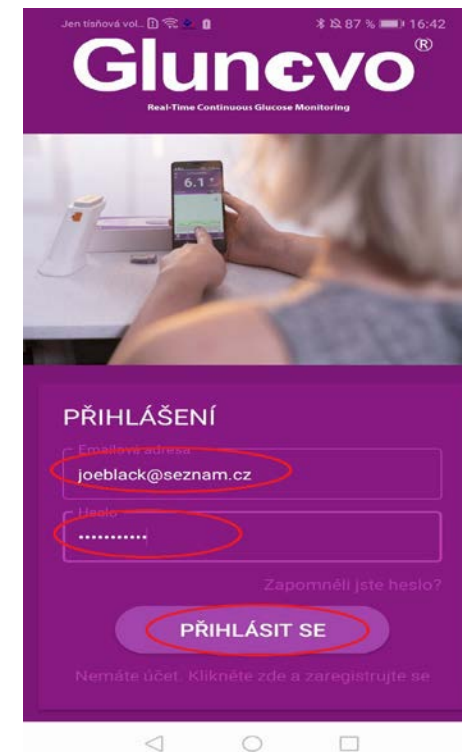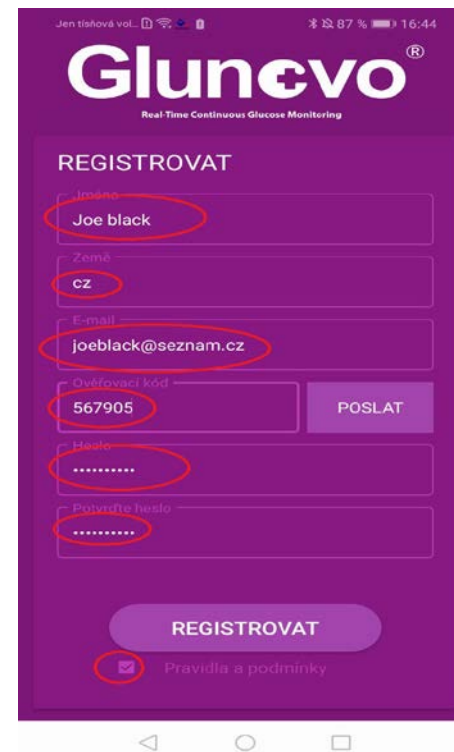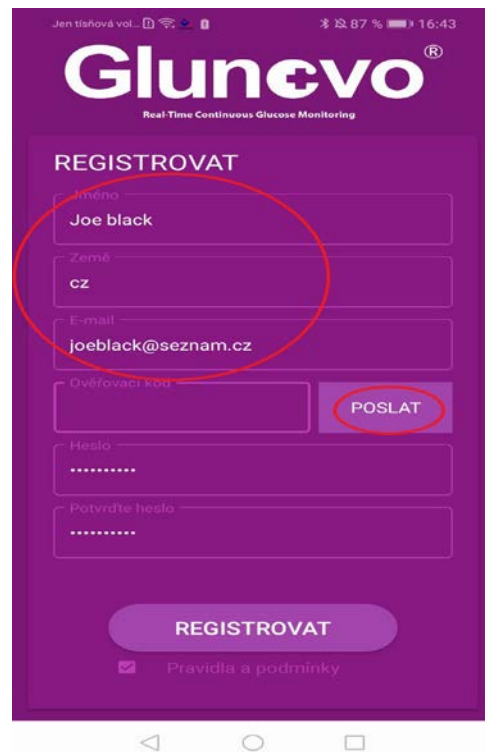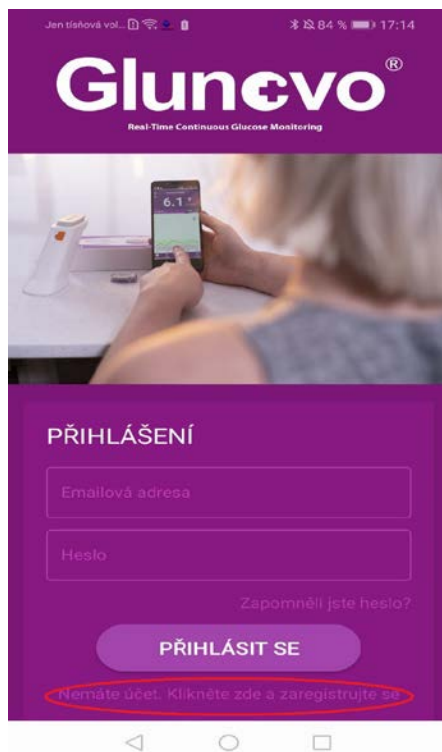

4. Webový portál www.glunovoshare.com

Na webový portál se přihlásíte pomocí stejných údajů jako do aplikace Glunovo Share.

Zadejte e-mail, heslo, opište ověřovací kód, potvrďte podmínky použití a přihlaste se.

glunovo share

joebblack@seznam.cz

.....


ověřovací kód **9739**

podmínky použití/zásady ochrany osobních údajů

zapamatovat si heslo zapomněli jste heslo?

přihlásit se


Po přihlášení můžete sledovat analytické zprávy a grafy pro správu diabetu.

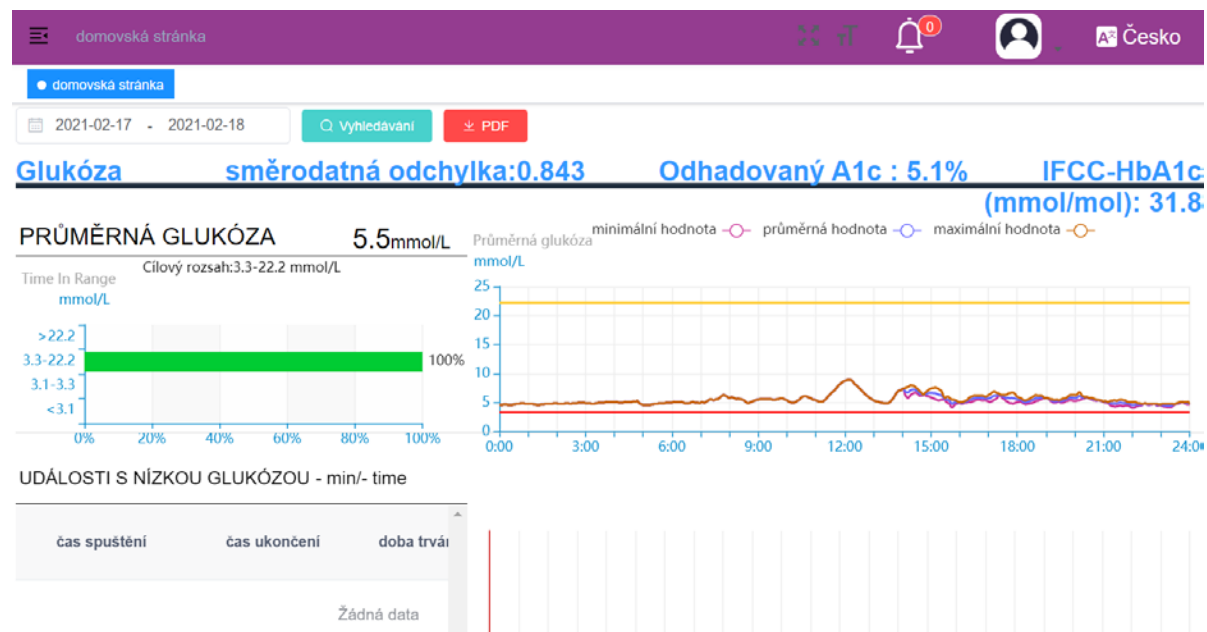

5. Sdílení dat

Aplikace Glunovo Share

- Aplikace Glunovo Share se používá pouze pro přenos dat na cloudový server, a to automaticky.
- Ruční přenos dat na cloudový server aktivujete tlačítkem **NAHRÁT**. (viz obrázek)

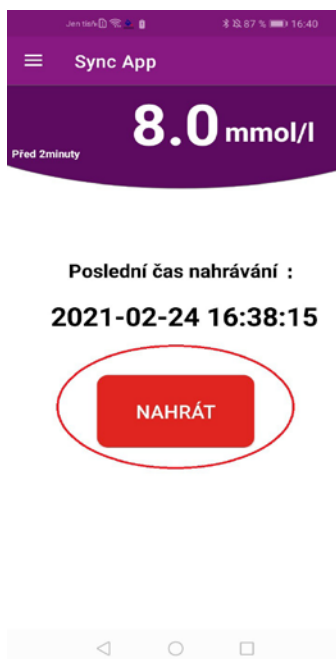

Kontakt: MEDATRON, spol. s r. o., Maříkova 36, 621 00 Brno
E-mail: glunovo@medatron.cz
Technická podpora: Po – Pá 8:00 – 17:00 hod.
Tel.: +420 737 664 106

Webový portál Glunovo Share

- Pro sdílení dat s ošetřujícím lékařem vyberte záložku **zpráva**.
- Ve sloupci **Operace** potvrďte sdílení dat s lékařem.
- Po potvrzení žádosti se **Stav** změní na **Schváleno**.
- Veškerá data mohou být po vašem odsouhlasení dostupná vašemu ošetřujícímu lékaři.

