

INSTALACE APLIKACE SYAI A REGISTRACE ÚČTU

1. Stáhněte si aplikaci SYAI.

- Aplikaci najdete v App Store (iPhone) nebo Google Play (Android).
- Můžete také: otevřít fotoaparát telefonu, namířit jej na QR kód a kliknout na zobrazený odkaz.
- Poté aplikaci stáhněte a otevřete.



2. Vytvořte si účet.

- Na modré obrazovce klikněte na „Zaregistrovat se“.

3. Zadejte e-mail/telefonní číslo.

- Vyplňte preferovaný způsob registrace: přes e-mail nebo telefonní číslo.
- Zaškrtněte políčko „Přijímám“ (pod modrým tlačítkem).
- Klikněte na „Odeslat“.

4. Zadejte ověřovací kód.

- Na e-mail nebo přes SMS vám přijde šesticiferný ověřovací kód.
- Doručení kódu může trvat několik minut.
- Kód opište do aplikace.

5. Vytvořte si heslo.

- Heslo musí obsahovat: alespoň 8 znaků, jedno číslo a jedno velké písmeno.
- Např. Diabetik1

6. Povolte určování polohy.

- Klikněte na „Povolit nyní“.

7. Nastavte jednotky glykémie.


- Vyberte rozmezí cílových hodnot mmol/L a klikněte na „Další“.

8. Vyplňte své údaje.

- Doplněte: jméno a příjmení, datum narození, výšku a hmotnost, typ diabetu a způsob léčby.

ZAVEDENÍ SENZORU SYAI

- 1. Aktivujte nový senzor.**
 - V aplikaci klikněte na „Použit nový senzor“.
- 2. Naskenujte QR kód.**
 - Otevřete fotoaparát telefonu a namiřte jej na QR kód na senzoru.
 - Klikněte na zobrazený odkaz.
- 3. Při zavedení postupujte dle pokynů na obrazovce telefonu.**

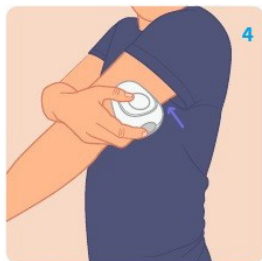

mecatron®

E-POUKAZY ZASÍLEJTE NA:

 +420 724 117 075

 poukazy@medatron.cz

 www.medatron.cz/e-poukazy

TaJaMed.CZ
Distribution 

TECHNICKÁ PODPORA (24/7):

 +420 732 116 990